



Gebrauchsanweisung CareLift™ Unterstützendes Geschirr

SOLVIT™
PRODUCTS

Fig 1 Hinterste teil (B)


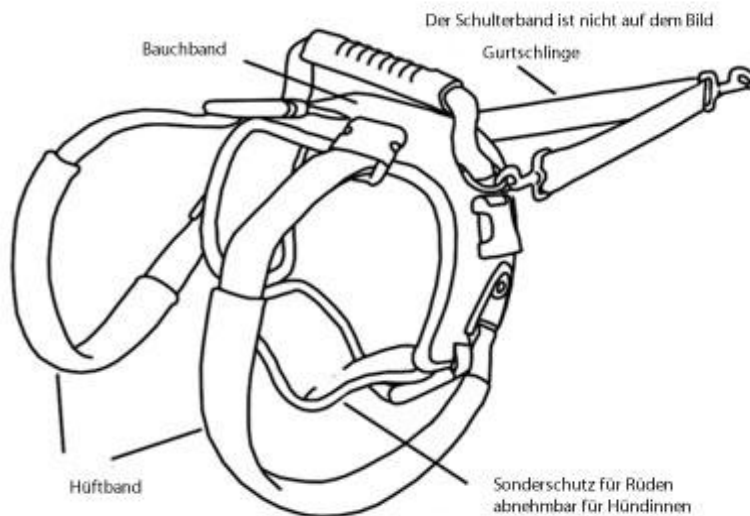


Vorderste teil (A)

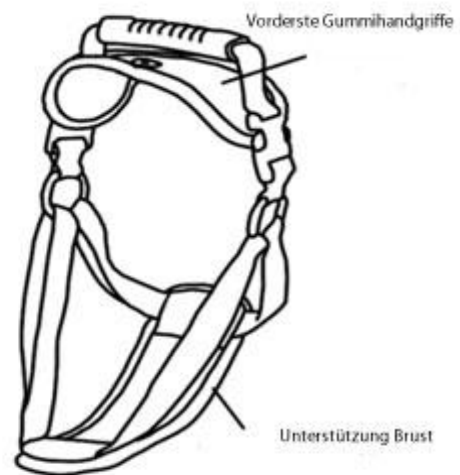


Den hinteren Teil anbringen:

Öffnen Sie den Plastik-Klickverschluss an einer Kante des Bauchbandes und an beiden Hüftbändern. Platzieren Sie das hintere Geschirr auf dem Rücken des Hundes, ca. 5cm vor dem Schwanzansatz. Legen Sie das Bauchband um den Bauch und befestigen Sie es an der anderen Seite. Führen Sie dann die Hüftbänder unter den Pfoten durch und befestigen Sie diese an der Hinterseite des Geschirrs. Passen Sie die Bänder an und kontrollieren Sie, ob das Geschirr fest sitzt, aber nicht zu fest. Für eine verbesserte Passform verfügen die Bänder über eine drehbare Verbindung an der Vorderkante des Bandes. Diese Verbindung kann auf verschiedene Positionen des Geschirrs eingestellt werden (2 bei Medium, 3 bei Large). Um diese Verbindung zu versetzen, schauen Sie auf die unten stehenden Abbildungen und folgen Sie den Anweisungen. Schieben Sie das Joch vom Stift des Hüftbandes. Entfalten Sie dann den Pivot-Teil, sodass es versetzt werden kann, falten Sie ihn wieder zusammen und schieben Sie das Joch des Hüftbandes wieder über den Stift.

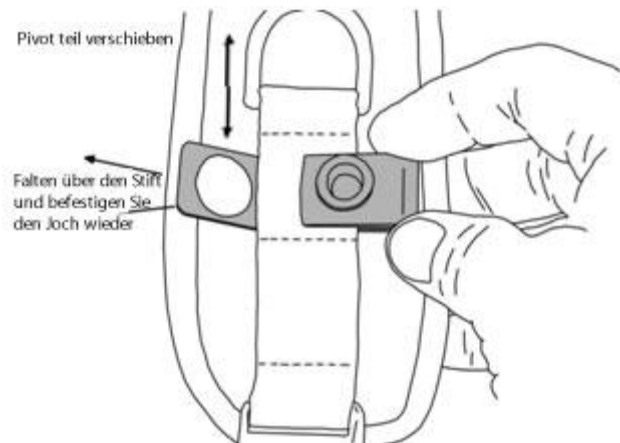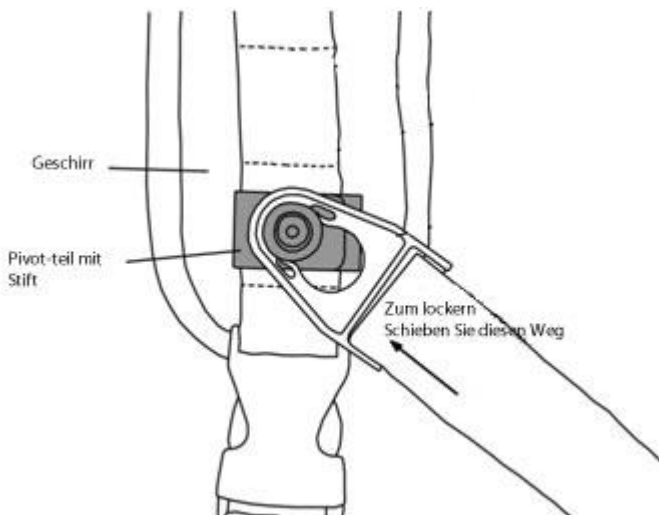

Sobald der hintere Teil platziert ist, kann der Hund mittels dem verstellbaren Riemen oder Gummihandgriff unterstützt werden. Das einzigartige Design des Geschirrs sorgt dafür, dass der Hund sowohl an den Hüftbändern als auch am Bauchband angehoben wird. Dies sorgt beim Hund für eine gleichmäßige Verteilung und Verminderung von Stress. Bei Rüden kann das Bauchband zum Pieschern entfernt werden. Lösen Sie den Klick-Verschluss und befestigen Sie ihn am Extra-Klick auf der anderen Seite. Der Hund kann noch stets an den Hüftbändern gehoben werden, sodass das Bauchband wieder neu befestigt ist. Das Bauchband ist mit einem Teil ausgestattet, welches die edlen Teile des Rüden schützt und die bei der Verwendung bei einer Hündin oder beim Reinigen entfernt werden können.

Hinterste teil (B)

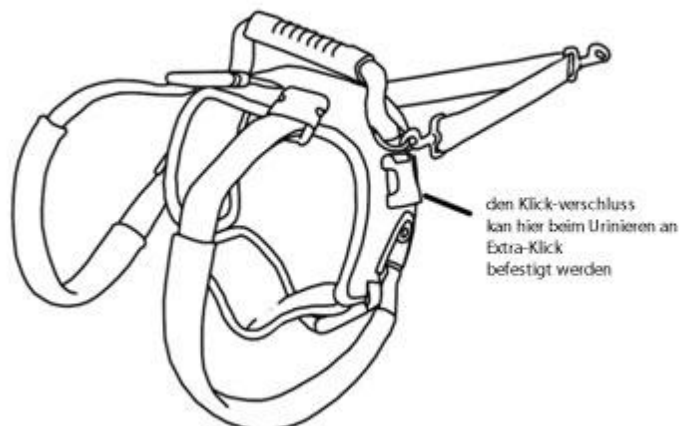


Den vorderen Teil platzieren:

Öffnen Sie den Klick-Verschluss beim Gummihandgriff. Legen Sie das Brustgeschirr auf den Boden und helfen Sie dem Hund, mit den Pfoten durch die Öffnungen an beide Kanten des Brustgeschirrs zu steigen. Heben Sie die Bänder an beiden Seiten des Brustzeugs an und platzieren Sie den oberen Teil hinter dem Nacken des Hundes.

Klicken Sie den Brustteil wieder an den Teil mit dem Gummihandgriff. Der Hund kann nun mithilfe des Anhebens durch die Verwendung der Gummihandgriffe unterstützt werden. Wenn diese nicht benötigt werden, kann die Hebeleine am D-Ring des vorderen Geschirrs befestigt werden (siehe Abbildung). Werden der hinterste und der vorderste Teil zusammengefügt, kann das gesamte Geschirr für längere Zeit sitzen bleiben, um dem Hund schnellstmöglich zu helfen. Diese Anwendung funktioniert allerdings nicht beim hinteren Teil alleine.

Hinterste teil (B)

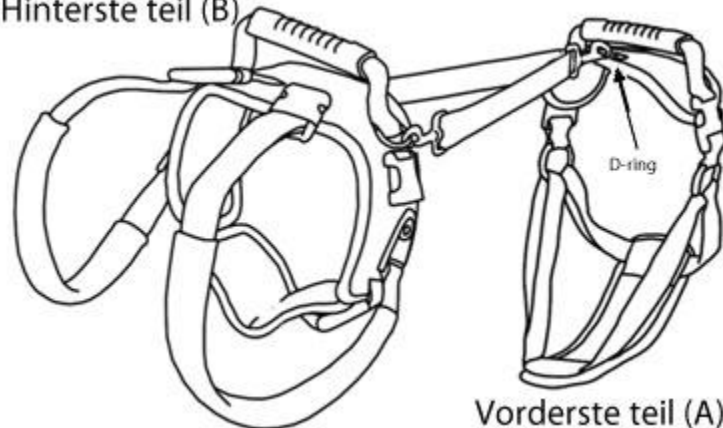

Optional:

Für schwerere Hunde oder zum Unterstützen auf längeren Abständen empfehlen wir Ihnen, das Schulterband zu verwenden. Um dieses zu montieren, lösen Sie die Hebeleine am vorderen Geschirr und befestigen Sie den Karabiner an dem einen Ende des Schulterbandes. Das andere Ende des Schulterbandes montieren Sie dann am D-Ring des vordersten Geschirrs.

Warnung: Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie Ihren Hund unterstützen. Gewichtverschiebungen können zu Gleichgewichtsstörungen führen. Kennen Sie Ihre Grenzen, unterstützen Sie grundsätzlich mit Ihren Beinen und nicht mit Ihrem Rücken!

Reinigen: Das Bauchband kann abgenommen und in der Waschmaschine bei niedriger Temperatur gewaschen werden. Entfernen Sie den Teilschutz für Rüden und waschen Sie diesen gesondert in Wasser mit Seife.

Garantie: Auf das CareLift™ Geschirr wird eine Garantie von 1 Jahr nach Anschaffungsdatum auf Materialfehler oder Fabrikfehler gewährt. Eine Kopie vom Original-Kassenbon ist bei Garantiefällen unbedingt erforderlich