

DERMIEL® PAD

PRODUKT

Dermiel Pad

10x10 cm feuchte Wundauflage

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dermiel Pads sind sterile Wundauflagen. Dermiel Pads bestehen aus einer Absorptionsschicht aus natürlicher Viskose, die mit einer nichtklebenden Schicht aus Polyethylen bezogen wurde. Die Innenseite wurde mit einer Flüssigkeit aus Honig und Glycerol versehen. Aus diesem Grund sind die Pads etwas feucht. Die Pads enthalten reinen Honig, der unter kontrollierten Umständen hergestellt wurde. Daher enthalten die Pads keine Rückstände von Pestiziden. Der Honig in den Pads hat einen hohen Gehalt an Honigenzymen, wie o.a. Glukose-Oxidase. Die Pads sind durchlässig, weswegen Wundfeuchtigkeit von der Viskose aufgenommen werden kann. Dank der Beschichtung verkleben die Pads nicht mit der Wunde.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Falls nötig die Wunde wie üblich reinigen.
2. Öffnen Sie die Verpackung bei der Einkerbung vorsichtig.
3. Entnehmen Sie die Kompresse und legen Sie sie auf die Wunde.
4. Die Kompresse auf herkömmliche Art und Weise fixieren, z.B. mit einem luftdurchlässigen Klebeband oder einer Mullbinde.
5. Nach 1 bis maximal 2 Tagen die Kompresse vorsichtig entfernen und durch ein neues Dermiel Pad ersetzen.

INDIKATIONEN

Dermiel Pads eignen sich zum Abdecken oberflächlicher Wunden.

KONTRAINDIKATIONEN

1. Nicht verwenden bei einer Überempfindlichkeit gegenüber Honig.
2. Im Fall von unerwarteten (nicht-vermeldeten) Nebenwirkung nach der Anwendung kontaktieren Sie bitte Ihren Tierarzt oder den Hersteller.

VORSICHTSMAßNAHMEN

- Nicht verwenden, falls die Verpackung beschädigt ist.
- Nicht verwenden sollte die Verpackung nicht verschlossen gewesen sein.
- Eine Wunde kann bis zu max. 30 Tage ununterbrochen mit diesem Produkt behandelt werden.
- Ein bereits benutztes Pad nicht wiederverwenden.
- Eine geöffnete Verpackung nicht wieder sterilisieren.

LAGERUNG

Zwischen 10 und 30 °C lagern.